

# Jeringa estéril de inyección desechable

## Luer Slip 1ml



### INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto:** Jeringa estéril de inyección desechable.

**Especificación y modelo:**

Jeringa de inyección: 1 ml  
Ref: HSL51ML, EAN13: 6945144753389

**Estructura principal, Rendimiento:**

1. Estructura principal

Nombre	Material
Manguito, varilla central, porta agujas y funda	polipropileno
Pistón	Caucho Natural
Lubricante	Polidimetilsiloxano

**Lista de Componentes y Materiales:**

2. Rendimiento: Este producto es estéril, sin pirógenos y sin hemólisis. Todos los materiales utilizados para producir nuestras jeringas son de grado médico y no contienen látex – “Latex free”

**Período de validez:** 3 años desde la esterilización.

**Ámbito de aplicación:** Este producto se utiliza para la inyección subcutánea, intramuscular e intravenosa de medicamentos líquidos, extracción de sangre y preparación de medicamentos líquidos.

**Uso:** Se puede utilizar después de desembalar. Presione firmemente la aguja de inyección y la junta cónica exterior de la jeringa para evitar fugas. Retire la funda de la aguja de inyección para extraer el medicamento líquido e inyéctelo después de extraer el aire hacia arriba.

**Condiciones de almacenamiento:** Los productos deben almacenarse en un ambiente fresco, seco, bien ventilado y limpio con una humedad relativa inferior al 80%, sin gases corrosivos, y debe estar completamente protegido.

**Precauciones y advertencias:**

1. Este producto está esterilizado con óxido de etileno, es estéril y no contiene pirógenos.
2. Compruebe la integridad del paquete individual antes de usarlo. Está prohibido utilizar el paquete individual con fugas, daños, caída de la funda y materias extrañas en él.
3. Este producto se esteriliza para un solo uso y se destruye después de su uso.
4. Este producto no se puede utilizar junto con meta acetaldehído.
5. Este producto debe ser utilizado y supervisado por profesionales sanitarios.

**Packaging:**

REF	PCS/BOX / Medidas (cm)	PCS/CARTON / Medidas (cm)
HSL51ML	100 pcs / 18 x 14,8 x 11,5	3000 pcs / 58 x 29,5 x 39,5



STERILE



CE 0344

**Fabricante:**

Changzhou Shuangma Medical Devices Co., Ltd.

Tel.: 0519-88676588 88671588 Dirección: Sanhekou Industrial Zone, Zhenglu Town, Tianning District, Changzhou City

**Importado por:**

Avda. Fuente Nueva, 12. 28703 San Sebastián de los Reyes – Madrid – España.

Tel.: +34 916588760. Fax.: +34 916588769

[marketing@Cartronic.es](mailto:marketing@Cartronic.es) [www.grupocartronic.com](http://www.grupocartronic.com)

