

Jeringa estéril de inyección desechable

Luer Slip 2ml



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto: Jeringa estéril de inyección desechable.

Especificación y modelo:

Jeringa de inyección: 2 ml
Ref: HSL52ML, EAN13: 6945144745575

Estructura principal, Rendimiento:

1.Estructura principal

Nombre	Material
Manguito, varilla central, porta agujas y funda	polipropileno
Pistón	Caucho Natural
Lubricante	Polidimetilsiloxano

Lista de Componentes y Materiales:

2. Rendimiento: Este producto es estéril, sin pirógenos y sin hemólisis. Todos los materiales utilizados para producir nuestras jeringas son de grado médico y no contienen látex - "Latex free"

Período de validez: 3 años desde la esterilización.

Ámbito de aplicación: Este producto se utiliza para la inyección subcutánea, intramuscular e intravenosa de medicamentos líquidos, extracción de sangre y preparación de medicamentos líquidos.

Uso: Se puede utilizar después de desembalar. Presione firmemente la aguja de inyección y la junta cónica exterior de la jeringa para evitar fugas. Retire la funda de la aguja de inyección para extraer el medicamento líquido e inyéctelo después de extraer el aire hacia arriba.

Condiciones de almacenamiento: Los productos deben almacenarse en un ambiente fresco, seco, bien ventilado y limpio con una humedad relativa inferior al 80%, sin gases corrosivos, y debe estar completamente protegido.

Precauciones y advertencias:

1. Este producto está esterilizado con óxido de etileno, es estéril y no contiene pirógenos.
2. Compruebe la integridad del paquete individual antes de usarlo. Está prohibido utilizar el paquete individual con fugas, daños, caída de la funda y materias extrañas en él.
3. Este producto se esteriliza para un solo uso y se destruye después de su uso.
4. Este producto no se puede utilizar junto con meta acetaldehído.
5. Este producto debe ser utilizado y supervisado por profesionales sanitarios.

Packaging:

REF	PCS/BOX / Medidas (cm)	PCS/CARTON / Medidas (cm)
HSL52ML	100 pcs / 18 x 11,8 x 15,5	3000 pcs / 61,5 x 38 x 48,5



STERILE



CE 0344

Fabricante:

Changzhou Shuangma Medical Devices Co., Ltd.

Tel: 0519-88676588 88671588 Dirección: Sanhekou Industrial Zone, Zhenglu Town, Tianning District, Changzhou City

Importado por:



Avda. Fuente Nueva, 12. 28703 San Sebastián de los Reyes – Madrid – España.
Tel.: +34 916588760. Fax.: +34 916588769
marketing@Cartronic.es www.grupocartronic.com